

Pflegehinweise zur Reinigung von Valplastprothesen



Liebe Patientin, lieber Patient,

wir freuen uns, dass Sie von Ihrem Zahnarzt Ihren neuen Zahnersatz erhalten haben. Um Ihnen die Anwendung so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Schritte und Hinweise in dieser Pflegeanweisung zusammengefasst.

Die für die Pflege benötigte Zahnbürste und dazugehörige Reinigungspulver können Sie gerne bei uns vor Ort erwerben. Oder sprechen Sie Ihren Zahnarzt an, gerne schicken wir es auch zu Ihrem Zahnarzt. Benutzen Sie bitte **KEINE** Zahnpasta und **KEIN** heißes Wasser für die Pflege Ihrer Dritten.

ACHTUNG: Pulver und Lösung dürfen nicht verschluckt werden, da es zu Übelkeit und Erbrechen führen kann.

Die **TÄGLICHE** Reinigung der Prothese:

1. Zuerst reinigen Sie bitte mit einer weichen Zahnbürste und Wasser Ihre Prothese.
2. Geben Sie nun $\frac{1}{4}$ des Beutelinhaltes (ca. ein halber Teelöffel) in ca. 250ml warmes Wasser und lassen Sie es für 3 Minuten stehen.
3. Nun legen Sie Ihre Valplastprothese für 10 bis 15 Minuten in die Lösung. Bei starken Verunreinigungen können Sie die Prothese auch über Nacht in der Lösung liegen lassen.
4. Anschließend spülen Sie Ihre Prothese gründlich mit Wasser ab.

Die **GLEICHE** Reinigungslösung kann für die nächsten **7 BIS 10 TAGE** verwendet werden.

